

ข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง เครื่อง O2 Capsule

การจำแนกระดับของอันตรายและความเสียหาย



อันตราย

การละลายเนื้อหาของข้อบ่งชี้นี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกาย



คำเตือน

การเพิกเฉยต่อเนื้อหาของข้อบ่งชี้นี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ตัวอย่างการแสดงรูปภาพ



ความสนใจ

โปรดให้ความสนใจเมื่อคุณเห็นเครื่องหมายนี้ รูปภาพในรูป
สามเหลี่ยมแสดงสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจ



ระวังไฟฟ้าช็อต



ข้อห้าม

เครื่องหมายนี้แสดงเนื้อหาที่ไม่ควรทำ รูปภาพในวงกลมแสดงสิ่ง
ที่ไม่ควรทำ



ห้ามถอดประกอบ



ต้องปฏิบัติตาม เครื่องหมายนี้แสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม
รูปภาพในวงกลมแสดงสิ่งที่คุณควรปฏิบัติตาม



**วิธีการถอดปลั๊กไฟอย่าง
ถูกต้อง**

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



อันตราย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อนใช้งาน



เสียง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกาย



อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบฝัง เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังได้ , เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ มิฉะนั้นอาจเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์และความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกายได้



ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปในตัวเครื่องหลัก



-ไม่ขีดหรือไฟแช็ก , เครื่องประดับที่คุณสวมใส่ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดออกซิเดชันกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นโลหะ) , แผ่นความร้อนแบบใช้แล้ว
ทิ้ง (แพ็คร้อน) , อื่น ๆ แหล่งกำเนิดประกายไฟ , วัตถุที่เปล่งประกายไฟจากการกระแทก ฯลฯ ขวด PET ที่ปิดฝาอยู่ , โลหะ วัตถุไวไฟ วัตถุ
แปลกปลอม สิ่งของสามารถใช้เป็นอาวุธได้ (มีด กรรไกร ฯลฯ)

※ โปรดอย่านำ มือถือแบบกันน้ำ เข้าภายในเครื่อง





อันตราย

การเพิกเฉยต่อเนื้อหาของข้อบ่งชี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

● หากคุณเป็นบุคคลต่อไปนี้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้



- เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ถุงลมโป่งพอง โรคอุดตันเรื้อรัง
- เข้ารับการรักษาด้วยอินซูลิน , มีเนื้องอกร้าย , โรคติดเชื้อต่างๆ
- เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับระบบหู การได้ยิน
- หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
- มีไข้
- ผู้ที่มีความผิดปกติในร่างกาย รับการรักษากับแพทย์ โดยเฉพาะหายใจเร็วเกินไป

● หากคุณเป็นบุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้งานเครื่อง



- โรคกลัวที่แคบ , ผู้ที่ล้างหูไม่ได้ (ปรับความดันของแก้วหู) , มีอาการคัดจมูกเป็นหวัดหรือโรคจมูกอักเสบ

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด



คำเตือน

การเพิกเฉยต่อเนื้อหาในข้อบ่งชี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน



prohibition

● กรุณาอย่าใช้แหล่งจ่ายไฟ ที่มีชื่อ กำลังไฟ 100 โวลต์

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้เครื่องเสียหายได้



prohibition

● กรุณาอย่ารบกวนหรือเอนตัวไปที่ตัวเครื่องหลักหรือชุดควบคุม

อาจก่อให้เกิดความเสียหายและการล้มอาจเกิดขึ้นจนทำให้ได้รับบาดเจ็บโดยไม่คาดคิด



prohibition

● ห้ามวางหรือนำสิ่งใดมาปิดกั้น บนตัวเครื่องหลัก อุปกรณ์ควบคุม หรือเครื่องผลิตออกซิเจน

อาจทำให้เครื่องชำรุดและเสียหายได้



prohibition

● กรณียาติดตั้งหรือใช้ในสถานที่ดังต่อไปนี้

- ในพื้นที่ ที่มีฝุ่น อุณหภูมิสูงหรือขึ้นสูง ใช้ในบ้าน (10-35 °C) และห้ามใช้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 °C (หากความร้อนสูงเกินไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการเสื่อมประสิทธิภาพ)
- พื้นที่เสียหายจากความเค็ม (แนะนำให้ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ที่อาจเกิดความเสียหายจากเกลือ)
- สถานที่ที่มีควันน้ำมันและไอน้ำ , ใกล้เคียงกระบวนการระบายความร้อนและสัญญาณเตือนไฟไหม้
- สถานที่ที่ไม่มั่นคงและไม่แข็งแรง (อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้)



prohibition

● กรณียาใช้ในสถานที่ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซเสีย

กลิ่นไม่พึงประสงค์และส่วนประกอบของแก๊สอาจมีความเข้มข้น ทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องได้



prohibition

● ห้ามใส่โลหะ วัสดุไวไฟ สิ่งแปลกปลอม ฯลฯ เข้าไปในเครื่อง

ห้ามใส่โลหะ วัสดุติดไฟ วัตถุแปลกปลอม ฯลฯ ลงในตัวเครื่อง หรือเพิ่มเติมสิ่งอื่นๆเข้าไปในตัวเครื่อง นอกจากนี้ห้ามนำของสกปรกหรือเศษขยะเข้าไปในเครื่อง



prohibition

● หากมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดหยุดใช้ทันที

สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ควันหรือกลิ่นแปลกๆ เมื่อปลั๊กและสายไฟร้อนผิดปกติ

- เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในอุปกรณ์อื่นเนื่องมาจากแผ่นดินไหว ไฟผ่า เป็นต้น



prohibition

● เมื่อคุณรู้สึกผิดปกติกับร่างกายขณะใช้งาน

หยุดใช้ทันที



prohibition

● ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่อง

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้เครื่องเสียหายได้

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด



คำเตือน

การเพิกเฉยต่อเนื้อหาในข้อบ่งชี้นี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ



must follow

● โปรดใช้เต้าเสียบที่มีขนาด 15A ขึ้นไปสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หากใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ส่วนของเต้ารับจะร้อนผิดปกติและทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเป็นประจำ เพื่อขจัดฝุ่น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



must follow

● ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง โปรดตรวจสอบอุปกรณ์และทดลองใช้งานก่อนใช้งานจริง



must follow

● เมื่อถอดปลั๊กไฟ ให้จับที่ปลั๊กแล้วดึงออก

หากไม่ปฏิบัติตาม อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากการแตกหักของวัสดุฉนวน



must follow

● ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือชำรุด

หากสายไฟ ปลั๊กไฟ และต่อลมหำรุดหรือเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ หากคุณยืนยันที่จะใช้โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย



must follow

● หากพบสิ่งผิดปกติ โปรดหยุดใช้งาน

หากพบความผิดปกติของอุปกรณ์หรือผู้ใช้ โปรดใช้มาตรการเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องอุปกรณ์ทันที



must follow

● ผู้ใช้ที่จะไม่สามารถใช้เครื่องและทำงานกับเครื่องได้:

- มีความพิการในร่างกายน , ผู้ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาในคู่มือการใช้งาน , เด็กก่อนวัยเรียนควรใช้ร่วมกับผู้ปกครอง



attention

● หากรู้สึกประหม่า ให้นำสิ่งที่สัมผัสภายนอกได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

รุ่นที่มีอัตราซีลสูง เช่น โทรศัพท์แบบกันน้ำ อาจมีการเสียรูป



attention

● ข้อควรระวังในการใช้

สำหรับห้องรูปแคบซูล: อย่าวางของหนักบนหน้าต่าง เข้าด้วยความระมัดระวัง ระวังศีรษะกระแทกกับขอบ

สำหรับห้องรูปทรงห้อง: ทางเข้าอยู่ต่ำ ระวังอย่าให้โดนศีรษะ ระวังอย่าให้พลิกคว่ำเมื่อเข้าหรือออกจากผลิตภัณฑ์



attention

● เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน ให้เปิดวาล์วไอเสียแบบแมนนวลและลดแรงดันอากาศ นอกจากนี้ หากไฟฟ้าขัดข้องระหว่างการใช้งานแรงดันจะหยุดและคลายการบีบอัด

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด



คำเตือน

การเพิกเฉยต่อเนื้อหาในข้อบังคับนี้และการจัดการอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ



attntion

● เกี่ยวกับเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน

ขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน จะมีเสียงการทำงานและเสียงลม



attntion

● เกี่ยวกับการจัดแสง

ใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีแรงดันไฟฟ้า 100V



attntion

● เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

หากมีกระแสน้ำออกจากเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ และทิ้งน้ำในถังระบายน้ำบ่อยๆ



attntion

● เกี่ยวกับการจำกัด

ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำกัดในพื้นที่ของคุณ